



sanaru.co.jp/fc
Foot care items
for Professional use

ニッパー / ソンデ / 爪切り / ヤスリなど 器具の洗浄アイテム



これだけは
そろえて
おきたい!

フットケア用品は、専用の洗浄アイテムを使って、
確実、丁寧に洗浄・消毒・除菌をしましょう。

衛生を保つことはもちろん器具を長持ちさせることにも繋がります。

器具用洗浄ブラシ

しっかり汚れを落としつつ
ニッパー類等金属の表面を
傷つけません

モヒカン

FOT-38-0002

全長(毛先含まず) = 215mm

毛先の長さ = 15mm

材質 = ナイロン



フット器具用洗浄ブラシ

FOT-38-0100

全長 = 100mm

毛先の長さ = 18mm 材質 = ソフトポリエステル

除菌ができる洗浄剤〈中性〉

洗いん

床や設備にも
使用できます

1kg入 **希釈使用**


スラシ洗浄の場合

= 20倍希釈


浸漬の場合

= 100~600倍

(30分程度)

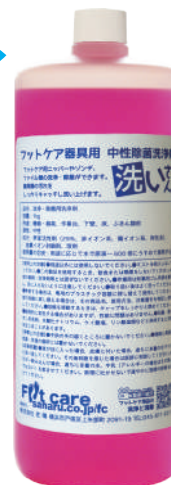

FOT-45-0020

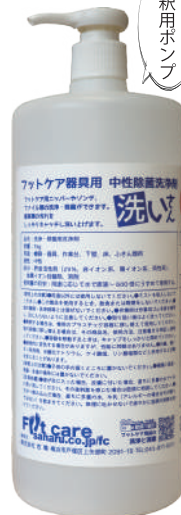

FOT-45-0021

希釈用ポンプ

超音波洗浄機〈日本製〉

WT-C401

FOT-39-0003



サロンや施設に1台は欲しい!
ニッパーの接合部分や
アタッチメントなどブラシ
の届きにくい細かい所まで
洗浄できます。

発振周波数: 40kHz

タンク容量: 1.3ℓ

タイマー: 5分 / 10分

サイズ:

W243×D196×W184mm

重量: 2.3kg

消毒液〈エタノール系〉

ツールクリーン[ユカリ]

希釈せずにすぐに使える
消毒液です。浸漬消毒は
もちろんスプレー容器に
詰め替えてもOK。設備品
にもご使用いただけます。

1ℓ / FOT-42-0002

4ℓ / FOT-42-0003



器具に
優しい

洗浄や消毒液による手荒れ肌荒れ対策に!

ケロデックス クリーム

〈医薬部外品〉

お仕事前に塗ることで、
洗剤や消毒液による肌
荒れを防ぎます。



ニッパー・はさみのメンテナンス剤

可動部の摩擦を軽減し
器具を長持ちさせます


医療用に開発された特殊潤滑油
です。除菌、滅菌を妨げません。
シリコン・フロンガス不使用。

器具のメンテナンス方法を
動画でチェック

▶ さなるフットケアチャンネル



オイルスプレー器具用 JG600
300mL FOT-12-0111

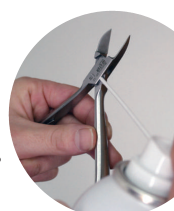

*製品の名称・仕様は予告なく変更となる場合がございます。



sanaru.co.jp/fc
Foot care items
for Professional use

ニッパー / ソンデ / 爪切り / ヤスリなど

フットケア用具の洗浄・消毒方法

STEP 1


洗浄 | ブラシ or 超音波洗浄機を使って器具を洗浄する

〈ブラシの場合〉

洗いさん(除菌剤入り中性洗浄剤)をナイロンブラシ等につけ、角質や汚れが取れるまで、しっかりこすり落とします。

〈超音波洗浄機の場合〉

超音波洗浄機に洗いさん(除菌剤入り中性洗浄剤)を入れ、5~10分超音波洗浄を行います。

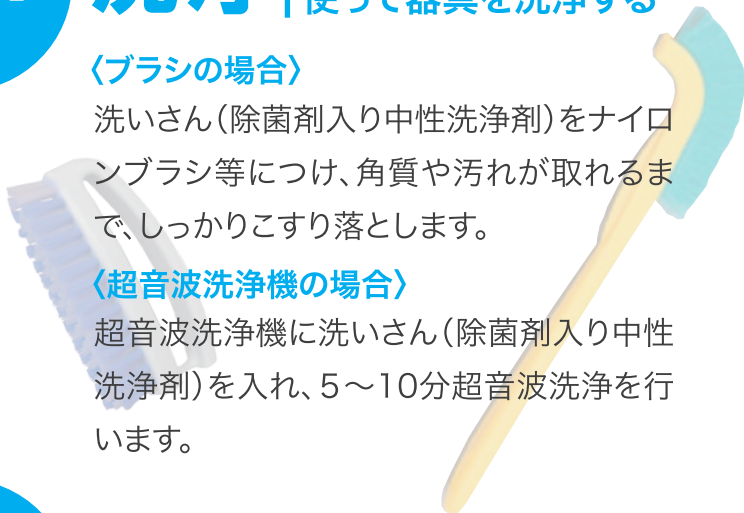

STEP 2

乾燥 | 十分に乾燥させる

濡れた状態で放置すると菌の繁殖や器具のサビなどの原因となります。
完全に乾燥させましょう。



STEP 3

オイル | メンテナンスオイルを塗る

ニッパーなどは、可動部分にも気を配ることが大切です。
洗浄後は可動部にメンテナンスオイルを塗布しましょう。



STEP 4

消毒 | 器具を消毒する

ツールクリーン(アルコール系消毒液)を使い、器具を清潔な状態に保ちます。

その他のポイント

器具はこまめに点検しましょう

器具の小さな傷は腐食や大きな破損に繋がることもあります。
普段からこまめに点検することにより、器具の寿命を延ばすことにつながります。

株式会社 佐 鳴

〒245-0053 横浜市戸塚区上矢部町 2091-19
TEL.045-811-9311(代) FAX.045-811-9319
www.sanaru.co.jp/fc/



YouTube

【プロ専用】

さなるのフットケアチャンネル [2304]

さなる フットケア Search